

Cavidagel® Yanık Yara Örtüsü



Tanımı: Yanık vakalarında acil durum için kullanılan su bazlı yara örtüsüdür. Köptük veya nonwoven üzerine Cavidagel emdirmiş yara örtüsü içeriği aktif bileşenler, ilaç veya lateks içermemekte, ve steril olarak üretilmektedir.

Özellikleri/ Faydaları:

- Anında soğutma etkisi sağlar
- Yanık bölgesini sararak ve koruyarak, kontaminasyonu engeller
- Su bazlıdır, suyun çözülebilir formülasyonu ile su veya tuz ile hızlıca durulama sağlar
- Bakteriyostatiktir, serbest ortamda kirlenmeye karşı sterildir
- Travma ve cilt tahrişini en düşük seviyeye indirir
- Yaranın iyileşmesi için nem sağlar, soğuk tutar ve yatıştırır
- Yapışmaz ve toksik değildir
- Kullanımı kolaydır
- Lateks içermez ve sterildir

Endikasyonları:

- Birinci ve ikinci derece yanıklarda
- Travma ve cilt hasarını minimize etmede
- Yaranın iyileşmesi için nemli ortamı sağlamada, serin tutma ve yatıştırmada
- Yapışkansızdır ve toksik değildir

Kontrendikasyonları: tüm yalın yanıklarda

Kullanışı:


- Serum fizyolojik ya da temiz su ile yarayı hafifçe temizleyiniz
- Paketi açın ve ürünü çıkartın
- Yaralı veya yanık bölgeye uygulayın
- Yapışkansız bir bandaj ile sabitleyin

Önemli:


- Yara üzerine merhem, yağ, kuru yara örtüsü gibi ürün kullanmayın; Cavidagel Yanık Yara Örtüsü tek başına kullanılmalıdır. Yarayı rahatlatır, kontaminasyonu önler, soğutma etkisi verir ve yaranın iyileşmesine yardımcı olur.
- Tekrar kullanılmamalıdır, tek kullanımlıdır.
- Paket yırtık veya açıksa, tekrar steril edilmemelidir.

Steril, tekli paketlerde ve farklı ebatlarda temin edilmektedir.


Cavidagel® burn dressing

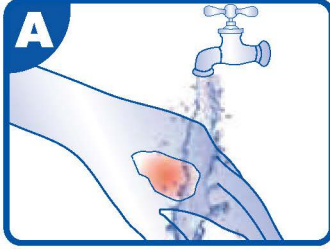


• Yanığı suyla yıkayın

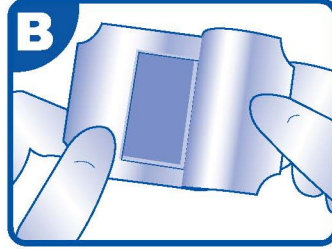

• Paketi açın
• Pansumanı çıkarın

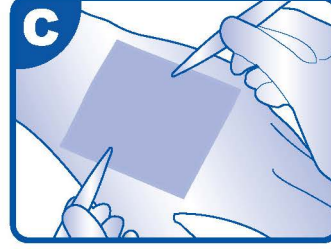

• Pansuman uygulayın

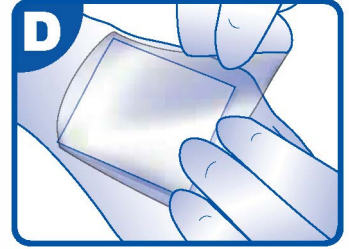

• Emici olmayan bandajla sabitleyin

Cavidagel burn dressing	cm	inch	Pieces/Box	Boxes/Case
Cavi burn 2550	2.5x50 cm	1" x 20"	5	24
Cavi burn 5050	5x5 cm	2" x 2"	5	24
Cavi burn 5015	5x15 cm	2" x 6"	5	24
Cavi burn 1010	10x10 cm	4" x 4"	5	24
Cavi burn 1040	10x40 cm	4" x 16"	3	24
Cavi burn 2020	20x20 cm	8" x 8"	3	24
Cavi burn 2045 (Face mask)	20x45cm	8" x 18"	3	24
Cavi burn 3040	30x40 cm	12" x 16"	3	24
Cavi burn 3040 (Face mask)	30x40 cm	12" x 16"	5	24
Cavi burn 4060	40x60 cm	16" x 24"	3	24
Cavi burn 2055	20x55cm	8" x 22"	5	24
Cavi burn 9176	91x76cm	35 ⁹ / ₁₆ " x 31 ¹ / ₈ "	2	24