


## Espuma® Gentle – Silikonlu Köpük Yara Örtüsü

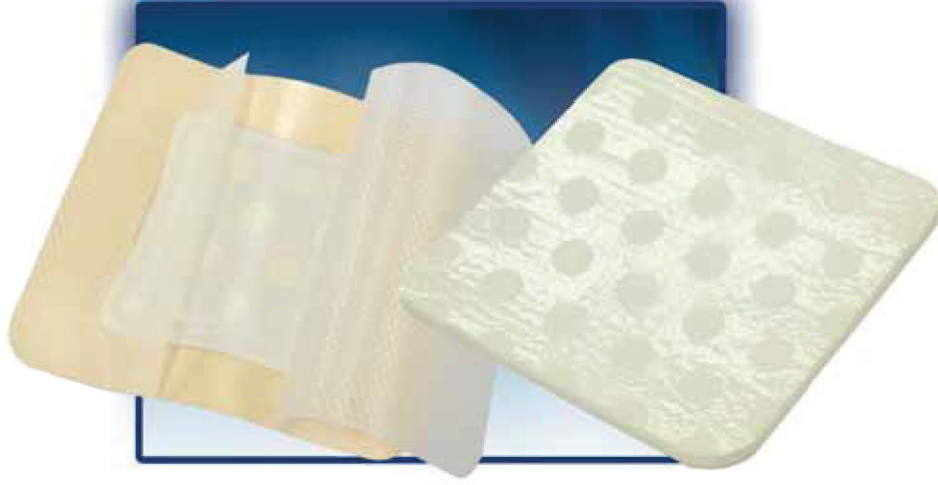

**Espuma Gentle;** poliüretan köpükten yapılmış emici, atravmatik, yara örtüsünün yara ile temas eden yüzeyi silikon ile kaplanmıştır. Dış yüzeyi hava geçirgen fakat su, bakteri ve virüs bariyerli poliüretan film ile kaplı, iç yüzeyi yumuşak silikon ile perfore edilmiştir. Böylece yaraya yapışması, acısız ve atravmatik çıkarım ve değişim sağlamaktadır. Ayrıca perfore yüzey eksudanın köpüğe kolayca ve eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktadır.

**Espuma Gentle Lite;** Espuma Gentle ile aynı bileşenlerden oluşmaktadır sadece daha ince bir köpük yapısına sahiptir.

**Espuma Gentle Comfort;** yara ile temas eden yüzeyi tamamıyla yumuşak silikon ile perfore edilmiştir. Böylece yapışkanlı kenarlar dahil yaraya temas eden tüm yüzeyi acısız çıkarım ve değişim sağlar. Böylece ikinci bir sabitleyici kullanmaya gerek duyulmaz. **Espuma Gentle Lite Comfort;** Espuma Gentle Comfort ile aynı bileşenlerde olup sadece daha ince bir köpük yapısına sahiptir.

**Espuma Gentle C Comfort;** Espuma Gentle Comfort ile aynı bileşenlerde olup orta yüzeyi köpük ve karbon olmak üzere iki katmandan oluşmaktadır. **Espuma Gentle Lite C Comfort;** Espuma Gentle C Comfort ile aynı bileşenlerde olup sadece daha ince bir köpük yapısına sahiptir.

## Özellikleri:

- Silikon yüzey sayesinde kolayca çıkarım ve değişim sağlar
- Perfore silikon yüzey eksudanın köpüğe geçişini sağlar ve maserasyonu engeller.
- Poliüretan köpüğün yüksek emiş kapasitesi bası etkisi sağlar
- Karbon içeren ürünler sayesinde kötü kokuların yayılması engellenir
- Yayıcı yüzey emilen eksudanın depolanacağı köpük yüzeye aktarılmasını sağlar
- Hava alabilen dış yüzey emilen eksudanın buharlaşmasını sağlar, böylece eksuda emiş kapasitesini genişletmiş olur
- Su geçirmez yüzey sayesinde hastanın duş alması mümkündür

## Endikasyonları:

- Kötü kokulu veya kokusuz, orta veya yüksek eksudalı yaralarda
- Birinci ve ikinci derece yanıklarda
- Cerrahi kesiklerde
- Diyabetik ayak ülserleri
- Bacak ve bası ülserleri
- Travmatik yaralar sonucu cilt kaybında
- Bazen kompres bandajı altında

## Kontrendikasyonları:

- Hipoklorit çözeltisi veya hidrojen peroksit gibi oksitleyici ajanlar, hidroselüler bileşenlerin yapışkanlığını kaybetmesine sebep olduğu için kullanılmamalıdır.
- Bu tip ürünlere veya bileşenlerine hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

## Önlemler:

- Herhangi bir enfeksiyon durumunda da kullanılabilir yalnız, doktor gözetiminde ve antimikrobiyal tedavi ile beraber uygulanmalıdır.

## Kullanılışı:

- Yarayı temizleyip kurulayın
- Silikon yüzeyde bulunan koruyucu kağıdı kaldırın
- Yara bölgesinden en az 2 cm dışarıda kalacak şekilde uygun ebatta ürünü seçiniz ya da yapışkanlı kenarlı olmayan ürünleri uygun ebatta keserek kullanabilirsiniz. Uyguladıktan sonra ikinci bir sabitleyici kullanabilirsiniz.

**Değiştirme sıklığı:** Ağır eksudalı yaralarda sıklıkla değişiklik yapılması gerekirken, hafif eksudalı yaralarda birkaç gün kalabilir.

Tekli mühürlü paketlerde sunulmaktadır, EO ile steril edilmiştir.

# ESPUMA® Gentle Family

Soft Silicone Polyurethane Foam Dressings

## Sizes:

ESPUMA® Gentle	ESPUMA® Gentle Lite	Size	Pieces/ box	Boxes / Case
Foam gentle 7575	Foam gentle L 7575	□ 75 x 75 mm	10	48
Foam gentle 100100	Foam gentle L 100100	□ 100 x 100 mm	10	48
Foam gentle 100150	Foam gentle L 100150	□ 100 x 150 mm	5	24
Foam gentle 100200	Foam gentle L 100200	□ 100 x 200 mm	5	24
Foam gentle 150150	Foam gentle L 150150	□ 150 x 150 mm	5	24
Foam gentle 150200	Foam gentle L 150200	□ 150 x 200 mm	3	24
Foam gentle 200200	Foam gentle L 200200	□ 200 x 200 mm	3	24
Foam gentle 200300	Foam gentle L 200300	□ 200 x 300 mm	3	24
ESPUMA® Gentle Comfort	ESPUMA® Gentle Lite Comfort	Size	Pieces/ box	Boxes / Case
FoamC gentle 100100	FoamC gentle L 100100	▣ 100 x 100 mm	10	48
FoamC gentle 100200	FoamC gentle L 100200	▣ 100 x 200 mm	5	24
FoamC gentle 150150	FoamC gentle L 150150	▣ 150 x 150 mm	5	24
FoamC gentle 200200	FoamC gentle L 200200	▣ 200 x 200 mm	3	24
FoamC gentle 180165 <small>Concave</small>	FoamC gentle L 180165 <small>Concave</small>	⊕ 180 x 165 mm	3	24
FoamC gentle 220220 <small>Sacral</small>	FoamC gentle L 220220 <small>Sacral</small>	△ 220 x 220 mm	3	24
ESPUMA® Gentle C Comfort	ESPUMA® Gentle Lite C Comfort	Size	Pieces/ box	Boxes / Case
FoamCC gentle 100100	FoamCC gentle L 100100	▣ 100 x 100 mm	10	48
FoamCC gentle 100200	FoamCC gentle L100200	▣ 100 x 200 mm	5	24
FoamCC gentle 150150	FoamCC gentle L150150	▣ 150 x 150 mm	5	24
FoamCC gentle 200200	FoamCC gentle L 200200	▣ 200 x 200 mm	3	24
FoamCC gentle 180165 <small>Concave</small>	FoamCC gentle L180165 <small>Concave</small>	⊕ 180 x 165 mm	3	24
FoamCC gentle 220220 <small>Sacral</small>	FoamCC gentle L 220220 <small>Sacral</small>	△ 220 x 220 mm	3	24
ESPUMA® Gentle Xtra Comfort	ESPUMA® Gentle Lite Xtra Comfort	Size	Pieces/ box	Boxes / Case
FoamC eX gentle 100100	FoamC eX gentle L100100	▣ 100 x 100 mm	10	48
FoamC eX gentle 100200	FoamC eX gentle L100200	▣ 100 x 200 mm	5	24
FoamC eX gentle 150150	FoamC eX gentle L150150	▣ 150 x 150 mm	5	24
FoamC eX gentle 200200	FoamC eX gentle L 200200	▣ 200 x 200 mm	3	24
FoamC eX gentle 180165 <small>Concave</small>	FoamC eX gentle L180165 <small>Concave</small>	⊕ 180 x 165 mm	3	24
FoamC eX gentle 220220 <small>Sacral</small>	FoamC eX gentle L 220220 <small>Sacral</small>	△ 220 x 220 mm	3	24
ESPUMA® Gentle C Xtra Comfort	ESPUMA® Gentle Lite C Xtra Comfort	Size	Pieces/ box	Boxes / Case
FoamCC eX gentle 100100	FoamCC eX gentle L100100	▣ 100 x 100 mm	10	48
FoamCC eX gentle 100200	FoamCC eX gentle L 100200	▣ 100 x 200 mm	5	24
FoamCC eX gentle 150150	FoamCC eX gentle L 150150	▣ 150 x 150 mm	5	24
FoamCC eX gentle 200200	FoamCC eX gentle L 200200	▣ 200 x 200 mm	3	24
FoamCC eX gentle 180165 <small>Concave</small>	FoamCC eX gentle L 180165 <small>Concave</small>	⊕ 180 x 165 mm	3	24
FoamCC eX gentle 220220 <small>Sacral</small>	FoamCC eX gentle L 220220 <small>Sacral</small>	△ 220 x 220 mm	3	24