

Kemagel® Steril Amorf Hidrojel



Tanımı: Kemagel® hidro-aktif kolloidden oluşan amorf hidrojeldir. Nekrotik dokuların gereken su ihtiyacını sağlar Ölü deriyi alıp eksudayı emerken ve otolitik debridmanı kolaylaştırır. Yaranın iyileşme sürecinde, kapanmasına doğru en yüksek seviyedeki nemi sağlar.

Özellikleri:

- Debridman etkisi: nekrotik dokulara nem sağlar ve debridmanı kolaylaştırır.
- Doku değiştirme etkisi: granülleşen dokuya zarar vermeden, ölü doku ve eksudayı emer.
- İyileşen dokuya nem sağlar: Yaranın iyileşmesine destekçi olan en yüksek seviyedeki nemi sağlar. İz kalma olasılığını düşürür ve hızlı rahatlama sağlar.
- Çok yönlü etkileri:
 - ✓ Kuru yaralarda, hidrojelin etkinliği ile nemli ortamı sağlar. Kuru yara, hidrojel içerisindeki suyu emer ve nekrotik/ hasarlı yaraların iyileşmesini sağlar.
 - ✓ Islak yaralarda ise hidrokolloid aktifleşir ve fazla akıntıyı emer, dokudaki su dengesini sağlar.

Endikasyonları:

- Yara çevresine nemli bir ortam sağlanması gereken aynalarda; küçük yanıklar, yüzeysel yaralanmalarda, kesik ve aşınmalarda (bölgesel kalın yaralar) ve deri sulanmasında kullanılır.
- Doktor gözetimindeyken Venöz (bacak) ülserleri, operasyonel kesiklerde, diyabetik ayak ülserlerinde, basınç ülserlerinde (4. Evre dahil) kullanılmaktadır.
- Nekrotik doku ile kaplı yaralarda otolitik debridmanı sağlayarak, yaraya nemli bir ortam sağlar.

Kullanılışı:

- Açık yaralarda kullanmak için: fizyolojik solüsyon ile yarayı steril ediniz. Tüpü açın ve yara yüzeyine değmeyecek şekilde, 5 mm kadar yara içerisine doğru yayarak uygulayın. Tüp içerisinde kalan jeli atın. İkinci bir yara örtüsü ile kapatın örn: Protectfilm
- Hafif yaralar ve yüzeysel yanıklarda: günde 1 veya 2 defa yaraya uygulayın. Eğer ikinci bir bandaj ile kapamak gerekirse, her gün değiştirin.
- Islık gazlı bez ile kolayca yara yüzeyinden temizlenebilmektedir.

Önlemler:

- Doktorunuz önermedikçe, iltihaplı ya da enfeksiyonlu yaralarda kullanmayınız.
- Kemagel® veya içeriğindeki maddelere alerjisi olan hastalarda kullanmayınız.
- Göze yakın ve ağız kısmı dar olan derin yaralarda, temizlenmesi zor olacağı için kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
- Dışarıdan kullanıdır.
- Tek kullanımlıktır, tekrar kullanılması halinde enfeksiyon riski doğar.

Kemagel® Amorphous

Sterile healing gel



Product	code	Size	Pieces / Case
Kemagel® amorphous Sachet	Gel S 6	6 gm	2000
Kemagel® amorphous Tube	Gel T15	15 gm	48
Kemagel® amorphous Tube	Gel T20	20 gm	48
Kemagel® amorphous Tube	Gel T25	25 gm	48
Kemagel® amorphous Tube	Gel T30	30 gm	48
Kemagel® amorphous Tube	Gel T50	50 gm	24
Kemagel® amorphous Tube	Gel T75	75 gm	24