

# Lipo-Colloid Dressings



**Tanımı:** Lipo-Kolloid örtüler, emici ve yapışkanlı olmayan yara örtüleridir. Jelleşen yapışkanlı olmayan lipo-kolloid yara ile temas eden yüzeyi, süper emici toz, yumuşak parafin ve yapışık polimerler emdirilmiş polyester ağları kapsamaktadır. Yara ile temas eden lipo-kolloid yüzey nonwoven tüyler veya emici poliüretan köpük yüzeyle kaplıdır.

## Nasıl Çalışır? :

1. Parafinik içeriğin kutupsal olmayan yağlı doğası vardır. Böylece, kutupsal proteinaz eksudalarda yapışmaz.
2. Hidrokolloid partiküller eksudayı emer ve jele dönüştürür. Böylece yaranın iyileşmesini hızlandıran nemli ortamı sağlar. Jel ve parafinik bileşenleri arasındaki sinerji sayesinde yapışmamasını sağlar.
3. Polyester, eksudanın emici yüzeye geçişini ve emilmesini sağlar. Böylece, fazla eksudanın yara yatağında kurumasını engeller.

## Özellikleri:

- Nem sayesinde iyileşme: hidrokolloid partiküller eksudayı emdikten sonra jele dönüşür. Böylece iyileşmeyi sağlayan nemli bir ortam sağlar.
- Acısız ve atravmatik çıkartma: eksuda ile temas eden yağlı ama yapışkanlı olmayan doğası ve jel formundaki dokusu sayesinde, lipo-kolloid yara örtüsü acısız ve atravmatik şekilde yaranın üzerinden çıkartılabilir.
- Emici: Poliüretan film ile kaplı olması veya nonwoven emici yüzeyi sayesinde yara örtüsü, farklı seviyedeki eksudaları emebilmektedir.
- Hızlı emicilik: eksuda, lipo-kolloid gözeneklerden kolayca emici yüzeye geçiş sağlar.
- Basınç altında da eksudayı tutmaktadır: basınç süresince bile eksudayı içerisinde tutmaktadır, böylece maserasyonu engellemekte ve yaranın iyileşmesi için nemi korumaktadır.
- Konforludur: yumuşak ve konforludur, böylece yaranın boşlukları için uygundur.
- Fibroblastların çoğalmasını sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.

## Çeşitleri:

### I- Orta ve ağır eksudalı yaralar:

1. ESPUMA® Lipo: emici ve yapışkanlı olmayan yara örtüsüdür. Jelleşen yapışkanlı olmayan lipo-kolloid yara ile temas eden yüzeyi, süper emici toz, yumuşak parafin ve yapışık polimerler emdirilmiş polyester ağları kapsamaktadır. Yar aile temas eden lipo-kolloid yüzey, yüksek emici poliüretan köpük ile kaplanmıştır.
2. ESPUMA® Lipo Comfort: ise ESPUMA® Lipo' nun ortada ped formunda oluşu ve etrafının hava alabilen, su geçirmez, bakteri ve virüs bariyerli poliüretan yapışkanlı kenarlardan oluşmuş formudur. Böylece sabitleme için ikinci bir bandaja gerek yoktur.

Endikasyonları: kronik yaralar ( bası ve bacak ülseri gibi), akut yaralar ( yanık, travmatik yaralar ve cilt aşınması gibi)

### II- Hafif eksudalı yaralar:

1. Vilowond® Lipo : emici ve yapışkanlı olmayan yara örtüsüdür. Jelleşen yapışkanlı olmayan lipo-kolloid yara ile temas eden yüzeyi, süper emici toz, yumuşak parafin ve yapışık polimerler emdirilmiş polyester ağları kapsamaktadır. Yara ile temas eden lipo-kolloid yüzey, emici nonwoven tüylerle kaplıdır.
2. Pharmapore® Lipo: ortasında Vilowond® Lipo ped bulunan, yumuşak ve konforlu, operasyon sonrası nonwoven yara örtüsüdür. Yumuşak nonwoven dokusu, özellikle hassas ciltler için uygundur.
3. Pharmapore® PU Lipo ve Pharmapore® PU Lipo Frame Style: ortasında Vilowond® Lipo ped bulunan, virüs ve bakteri bariyerli, su geçirmez poliüretan filminden oluşmaktadır. Çerçeve stili ise kolayca uygulamayı sağlar.
4. Pharmapore® Ultra Lipo: ortasında Vilowond® Lipo ped bulunan, dış yüzeyi hava alabilen, su geçirmez ve bakteri-virüs bariyerli poliüretan film kaplı nonwoven yara örtüsüdür. Pharmapore® Lipo gibi hassas ciltlere uygun, Pharmapore® PU Lipo gibi su geçirmez, virüs ve bakteri bariyerlidir.  
Endikasyonları: akut yaralarda ( yanıklar, cilt aşınmaları, travmatik yaralar gibi) ve kronik yaralarda ( bacak ve bası ülseri gib)

### III- Küçük yaralar:

1- Cure-Aid® Lipo : yapışkanlı bandajlardır.

2- Cure-Aid® dressing strip Lipo : yapışkanlı bandajlardır, istenilen ebatlarda kesilebilir.















Endikasyonları: küçük yaralarda, eksuda olursa onu emmesi ve iyileşmeyi sağlayan nemli ortamı sağlaması için yarayı kapamaya yarar.

### Kontrendikasyonları/ Önlemler:

1. İçeriğindeki elementlere hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.
2. Sterildir, bu yüzden hasar görmüş paketleri kullanmayınız.
3. Bloke edici değildir, bu yüzden enfeksiyonlu yaralarda, doktor gözetimi altında kullanılabilir ve her gün değiştirilmelidir.
4. Doğru şartlarda saklanmalıdır, sıcaktan korunmalı, nem ve ışıktan uzak tutulmalıdır.

# Lipo-Colloid dressings

Table of sizes:

<b>ESPUMA® Lipo</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
Foam Lipo 7575 	7.5 x 7.5 cm	2.95 x 2.95 in	10	48
Foam Lipo 100100 	10 x 10 cm	4 x 4 in	10	48
Foam Lipo 100150 	10 x 15 cm	4 x 6 in	5	24
Foam Lipo 100200 	10 x 20 cm	4 x 8 in	5	24
Foam Lipo 150150 	15 x 15 cm	6 x 6 in	5	24
Foam Lipo 150200 	15 x 20 cm	6 x 8 in	3	24
Foam Lipo 200200 	20 x 20 cm	8 x 8 in	3	24
Foam Lipo 200300 	20 x 30 cm	8 x 12 in	3	24
<b>ESPUMA® Lipo Comfort</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
FoamC Lipo 100100 	10 x 10 cm	4 x 4 in	10	48
FoamC Lipo 100200 	10 x 20 cm	4 x 8 in	5	24
FoamC Lipo 150150 	15 x 15 cm	6 x 6 in	5	24
FoamC Lipo 200200 	20 x 20 cm	8 x 8 in	3	24
FoamC Lipo 180165  Concave	18.5 x 16.5 cm	7.28 x 6.5 in	3	24
FoamC Lipo 220220  Sacral	22 x 22 cm	9 x 9 in	3	24
<b>Vilowond® Lipo</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
Pad Lipo 5050	5 cm X 5 cm	2 x 2 in	75	16
Pad Lipo 5075	5 cm X 7.5 cm	2 x 3 in	75	16
Pad Lipo 5010	5 cm X 10 cm	2 x 4 in	40	16
Pad Lipo 1010	10 cm X 10 cm	4 x 4 in	40	16
Pad Lipo 1015	10 cm X 15 cm	4 x 6 in	30	16
Pad Lipo 1020	10 cm X 20 cm	4 x 8 in	30	16
<b>Cure -Aid® Lipo</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
Cure Lipo 938	9 mm x 38 mm	3/8 x 1 1/2 in	200	60
Cure Lipo 1938	19 mm x 38 mm	3/4 x 1 1/2 in	100	60
Cure Lipo 1963	19 mm x 63 mm	3/4 x 2 1/2 in	100	60
Cure Lipo 1972	19 mm x 72 mm	3/4 x 2 7/8 in	100	60
Cure Lipo 2572	25 mm x 72 mm	1 x 2 7/8 in	100	60
<b>Pharmapore® I.V Lipo</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
IVNW lipo 76	7 cm x 6 cm	2 3/4 x 2 1/4 in	50	16
IVNW lipo 1012	10 cm x 12 cm	4 x 4 3/4 in	40	16
IVNW lipo 68	6 cm x 8 cm	2 3/8 x 3 1/8 in	50	16
<b>Pharmapore® PU I.V Lipo</b>	<b>Size</b>		<b>Pieces/ box</b>	<b>Boxes / Case</b>
	cm	inch		
IVPU lipo 76	7 cm x 6 cm	2 3/4 x 2 3/8 in	50	16
IVPU lipo 1012	10 cm x 12 cm	4 x 4 3/4 in	40	16
IVPU lipo 68	6 cm x 8 cm	2 3/8 x 3 1/8 in	50	16



# Lipo-Colloid dressings

<i>Cure -Aid® Dressing Strip Lipo</i>	Size		Pieces/ box	Boxes / Case
	cm	inch		
Dermi Lipo 610	6 cm x 10 cm	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 4 in	10	120
Dermi Lipo 810	8 cm x 10 cm	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 4 in	10	120
Dermi Lipo 6100	6 cm x 100 cm	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 40 in	1	120
Dermi Lipo 8100	8 cm x 100 cm	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 40 in	1	120
<i>Pharmapore® Lipo</i>	Size		Pieces/ box	Boxes / Case
	cm	inch		
Pore Lipo 705	7 cm x 5 cm	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 2 in	100	8
Pore Lipo 1010	10 cm x10 cm	4 x 4 in	50	8
Pore Lipo 1015	10 cm x 15 cm	4 x 6 in	50	8
Pore Lipo 1020	10 cm x 20 cm	4 x 8 in	30	8
Pore Lipo 1025	10 cm x 25 cm	4 x 10 in	30	8
Pore Lipo 1030	10 cm x30 cm	4 x 12 in	30	8
Pore Lipo 1035	10 cm x35 cm	4 x 14 in	30	8
<i>Pharmapore® PU Lipo</i>	Size		Pieces/ box	Boxes / Case
	cm	inch		
Pore PU Lipo 705	7 cm x 5 cm	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 2 in	100	8
Pore PU Lipo 1010	10 cm x10 cm	4 x 4 in	50	8
Pore PU Lipo 1015	10 cm x 15 cm	4 x 6 in	50	8
Pore PU Lipo 1020	10 cm x 20 cm	4 x 8 in	30	8
Pore PU Lipo 1025	10 cm x 25 cm	4 x 10 in	30	8
Pore PU Lipo 1030	10 cm x30 cm	4 x 12 in	30	8
<i>Pharmapore® PU Lipo</i>	Size		Pieces/ box	Boxes / Case
	cm	inch		
Pore PUFs Lipo 67	6 cm x 7 cm	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in	100	8
Pore PUFs Lipo 1010	10 cm x10 cm	4 x 4 in	50	8
Pore PUFs Lipo 1015	10 cm x 15 cm	4 x 6 in	50	8
Pore PUFs Lipo 1020	10 cm x 20 cm	4 x 8 in	30	8
Pore PUFs Lipo 1025	10 cm x 25 cm	4 x 10 in	30	8
Pore PUFs Lipo 1030	10 cm x30 cm	4 x 12 in	30	8
<i>Pharmapore® Ultra Lipo</i>	Size		Pieces/ box	Boxes / Case
	cm	inch		
Pore U Lipo 106	10 cm x 6 cm	4 x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> in	100	8
Pore U Lipo 1010	10 cm x10 cm	4 x 4 in	50	8
Pore U Lipo 1015	10 cm x 15 cm	4 x 6 in	50	8
Pore U Lipo 1020	10 cm x 20 cm	4 x 8 in	40	8
Pore U Lipo 1025	10 cm x 25 cm	4 x 10 in	30	8
Pore U Lipo 1030	10 cm x30 cm	4 x 12 in	30	8
Pore U Lipo 1035	10 cm x35 cm	4 x 14 in	30	8

Other sizes available upon request